

Vidéo explicative sur www.ccref.org/colotest

1

Avant la réalisation du prélèvement



Complétez le document d'identification avec :

- votre vignette de mutuelle;
- votre N° d'identification du Registre national (que vous trouvez sur votre carte d'identité et qui commence par les 2 derniers chiffres de votre année de naissance);
- la date de réalisation de votre test;
- vos informations personnelles complètes;
- les coordonnées complètes et lisibles (en lettres MAJUSCULES) de votre médecin traitant.

Sans document d'identification dûment et lisiblement complété, nous ne pouvons pas analyser votre test.



xxxxx/année.mois

Vérifiez la date d'expiration précisée sur votre test. Utilisez ce test dès que possible et au plus tard jusqu'à la fin du mois de l'année indiqué sur le test. Si un doute subsiste quant à la validité de votre test, téléphonez-nous au **010238272** AVANT de le jeter.

Inscrivez votre nom (N), votre âge (A) et la date de réalisation (D) sur le test à l'endroit prévu à cet effet. **Merci de ne rien coller sur le test et de ne pas retirer le code-barres.**

2

Réalisation du prélèvement



Dépliez le dispositif (*biodégradable*) de collecte des selles et enlevez les 3 petits papiers de protection des autocollants. Collez-le sur 3 points de la lunette de vos toilettes avec les trous devant.


Si vous préférez, vous pouvez utiliser directement tout autre système de récolte des selles (un sac en plastique, un récipient propre, ...).

Important : pour que le test soit réussi, il ne faut pas que les selles soient en contact avec un liquide (urine, eau, nettoyage WC, ...)


Une fois le système de collecte installé, allez à selles. Prenez le test et ouvrez-le en tournant la partie verte.

Plus d'informations à l'intérieur

Vidéo explicative sur www.ccref.org/colotest

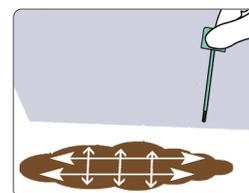

Passez le bout de la tige verte de prélèvement sur la surface de vos selles comme illustré. Couvrez complètement les rainures de la tige, sans excès. La tige est verte sur toute sa longueur et il n'y a pas d'ouate au bout de celle-ci.

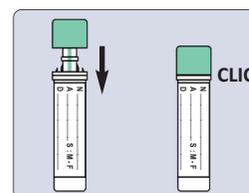

Quand l'extrémité de la tige est colorée par les selles, replacez la tige dans le tube et pressez fermement le bouchon vert jusqu'à entendre un « clic ».


Ne videz pas le liquide du tube !
Après fermeture, n'ouvrez plus le test.



Mettez votre test dans le sachet vert de protection. Fermez-le au moyen du zip. Si vous ne pouvez pas le poster directement, gardez le sachet de protection contenant le test dans la porte du réfrigérateur jusqu'au moment de l'envoi.

3

Envoi du test

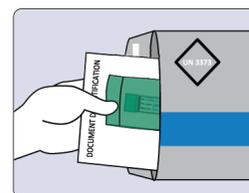

Si ce n'est déjà fait, vérifiez toutes les informations sur le document d'identification. Glissez le document d'identification et le sachet vert contenant le test dans l'enveloppe retour préadressée avec le logo UN 3373 (enveloppe grise).

Fermez l'enveloppe et postez-la sans mettre de timbre. N'utilisez pas l'enveloppe bleue !



Il est recommandé de poster l'enveloppe retour dès que possible. Lors de canicule ou de froid excessif, veuillez ne pas poster votre test la veille d'un week-end.

Postez l'enveloppe au plus tard dans les 5 jours qui suivent le prélèvement.

Plus d'informations à l'intérieur

UN GESTE SIMPLE
ET RAPIDE
QUI PEUT VOUS
SAUVER LA VIE

En Belgique, près de 7 500 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année.

Détecté à un stade précoce, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.

A cet effet, un test de recherche de sang occulte dans les selles est recommandé tous les 2 ans pour les personnes asymptomatiques de 50 à 74 ans.

En cas de symptômes digestifs, de maladie digestive inflammatoire chronique, d'antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal, nous vous recommandons de consulter d'abord votre médecin généraliste.

Ne réalisez pas ce test lors de saignements hémorroïdaires.

Si vous avez réalisé ce dépistage auparavant, un nouveau kit de dépistage sera envoyé automatiquement à votre domicile 2 ans après votre dernier test négatif si vous êtes encore dans les conditions pour en bénéficier.



Si des questions subsistent après lecture de ce mode d'emploi, contactez notre équipe en ayant à disposition votre N° d'identification du Registre national.

CONTACT

Tél 010 23 82 72

Fax 010 45 67 95

E-mail colorectal@ccref.org

Web www.ccref.org - www.cancerintestin.be



Editeur responsable : CCR asbl • Rue André Dumont, 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert - Ed. 04/2023

important

- ✓ Vous ne pouvez utiliser le test qu'une seule fois.
- ✓ Avant sa réalisation, conservez le test à température ambiante.
- ✓ Après sa réalisation, conservez le test au réfrigérateur jusqu'au moment de l'envoi.
- ✓ Tenir hors de portée des enfants et des animaux, le liquide contenu dans le test étant toxique.

Questions fréquentes

Quel est le délai d'utilisation du test ?

Réalisez le prélèvement au plus tard à la fin du mois de l'année indiqué sur le test (📅 xxxxx/année.mois).

J'ai des hémorroïdes/des symptômes/des antécédents, puis-je réaliser le test ?

Ne réalisez pas ce test lors de saignements hémorroïdaires.

En cas de symptômes digestifs, de maladie digestive inflammatoire chronique, d'antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal, nous vous recommandons de consulter d'abord votre médecin généraliste.

J'ai perdu le test/le test est abîmé/le prélèvement ne s'est pas déroulé correctement, que dois-je faire ?

Ne jetez rien et contactez notre équipe par téléphone au **010 23 82 72** ou par e-mail colorectal@ccref.org en ayant votre N° d'identification du Registre national (que vous trouvez sur votre carte d'identité et qui commence par les 2 derniers chiffres de votre année de naissance) à disposition.

Comment obtenir le résultat ?

Le résultat sera envoyé au médecin renseigné sur le document d'identification et disponible sur le Réseau Santé Wallon au plus tard 10 jours après l'analyse de votre test par le laboratoire.

Que se passe-t-il si le test est positif ?

Votre médecin vous orientera vers un gastro-entérologue qui vous proposera une coloscopie. Contrairement au test, la coloscopie n'est pas gratuite. Renseignez-vous auprès du gastro-entérologue et de votre mutualité.

Quand devrais-je refaire ce test ?

Un nouveau test sera envoyé automatiquement à votre domicile 2 ans après le dernier test dont le résultat était négatif et pour autant que vous soyez encore dans les conditions pour en bénéficier.

Vous ne souhaitez plus participer ?

Nous vous invitons à nous le signaler via www.ccref.org/stopcolon ou par e-mail colorectal@ccref.org ou par téléphone au **010 23 82 72**.

Pour tout contact, renseignez votre N° d'identification du Registre national.